

ANDADOR DE INCORPORACIÓN · 2108

Producto de apoyo para caminar, destinado a ayudar a personas con movilidad reducida a mantener la estabilidad y el equilibrio durante la marcha.



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Referencia	2108
Fabricante	Sucesores de Manuel García, S.L. / García 1880
Producto	Andador de incorporación, plegable y regulable en altura
Material	Aluminio
Ancho / profundidad	60 cm / 50 cm
Altura regulable	83 - 101 cm
Peso máximo soportado	110 kg
Peso del artículo	2,5 kg
Entorno de uso	Interiores y exteriores

USO PREVISTO Y LIMITACIONES

Ayuda para caminar. No está diseñado para personas con problemas graves de equilibrio o alteraciones perceptivas funcionales. No utilizar para otros fines ni realizar modificaciones mecánicas.

INFORMACIÓN DECLARADA POR EL FABRICANTE

El manual V3 de octubre de 2022 declara que es un producto sanitario de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745 e incluye el marcado CE. Esta ficha recoge la declaración del documento aportado, sin constituir una certificación independiente.

2108 · AJUSTE, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN

AJUSTE Y USO

Altura adecuada	Con el brazo hacia abajo, la empuñadura debe quedar a la altura de la muñeca. Con la mano apoyada, el codo debe flexionarse 20° - 30°.
Regulación	Presionar el pin metálico, ajustar la pata y comprobar su bloqueo. Repetir en las cuatro patas hasta que queden a la misma altura.
Incorporación	Para incorporarse, colocar las manos en el primer nivel de apoyo, según las instrucciones del fabricante.
Marcha	Alinear la parte media del pie con las patas traseras. Levantar el andador, situarlo delante y asegurar el apoyo de las cuatro patas antes de dar el paso.

PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

Comprobar el estado del conjunto y las conteras; sustituirlas cuando muestren desgaste. Las cuatro patas deben estar a la misma altura, con los botones visibles, sin hundirse y bloqueados. Revisar periódicamente tornillos y tuercas. No usar con defectos o piezas ausentes, dañadas o mal ajustadas; consultar al distribuidor. No usar en escaleras mecánicas sin ayuda o supervisión. No superar 110 kg.

Limpiar periódicamente con paño suave húmedo y jabón neutro; secar después. No utilizar limpiadores agresivos, abrasivos ni productos grasos. Guardar en lugar seco, a temperatura ambiente. No realizar modificaciones mecánicas.

DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD

Fuente adjunta	Manual de usuario 2108, V3 102022, aportado por Alberto. Documento original incluido como archivo adjunto en este PDF.
Vida útil indicada	El manual contempla 24 meses de conservación en perfecto estado, condicionados al uso, almacenamiento y mantenimiento conforme a sus instrucciones.
Garantía indicada	El manual de octubre de 2022 indica 24 meses por defectos de fabricación y excluye desgaste y uso o mantenimiento inadecuados. Es una transcripción documental, no una limitación de los derechos legales aplicables.
Incidentes y eliminación	Comunicar incidentes graves al fabricante y a la autoridad competente. Eliminar producto y envase conforme a las normas locales.
Fotografía	Extraída del manual del fabricante, referencia 2108.

Resumen técnico. No sustituye la lectura del manual completo ni sus instrucciones de seguridad.